

## オンラインセンサー交換申請のよくあるご質問

- Q** どのような不具合が交換申請可能ですか？ 承認されないケースはありますか？
- A** センサーエラーや自然な剥がれによる不具合に交換対象は限られます。センサーが14日以上使用されている場合などは承認されません。対象可否は弊社にて確認の上、交換対象外となる場合、あるいは確認事項がある場合には別途ご連絡させていただきます。
- Q** 申請にはどのような情報が必要で、入力にはどれくらい時間がかかりますか？
- A** センサー使用情報（装着期間やシリアル番号）、氏名・住所・電話番号などの代替品の配送先情報が必要です。メールアドレスは任意となり、スマートフォンのOSや端末情報は不要です。必要情報が揃っていれば5分程度で完了します。
- Q** 代替品の発送にはどれくらいかかり、その際に返品は必要ですか？
- A** 通常、申請後、祝日を除く3～5営業日以内に発送手続きされます。受け取り日の指定はできません。不具合センサーの返品が必要な場合は、代替品の配送箱に同梱されている返却用封筒をご使用いただけます。

## 事前にご準備いただくこと

センサー交換申請時にシリアル番号が必要となりますので、事前にご確認ください。

### 「FreeStyle リブレ Link アプリ」使用时

- FreeStyle リブレ Link アプリを開きます。
- 左上のメニューを選択します。
- 「このアプリについて」をクリックします。
- 「最後に使用された3つのセンサー」に、センサーのシリアル番号が表示されます。


※一番上の赤枠部分が、装着した最新のセンサーまたは現在装着しているセンサーです。



### 「Reader」使用时


- Readerのホーム画面から開始します。
- 設定に移動します(右上隅の歯車マーク)。
- 下向き矢印で、[システム ステータス]を選択します。
- 次に、[システム情報]を選択します。
- もう一度下向き矢印を使用して、次の画面に移動します。
- ご使用いただいたセンサーのシリアル番号(SN)が表示されます。

※(1)が、装着した最新のセンサーまたは、現在装着しているセンサーです。

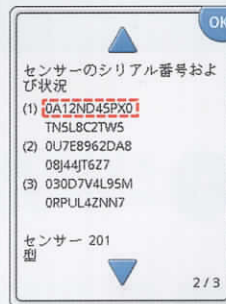

### アプリやReader画面で確認できない場合は

センサーの箱がまだお手元に残っている場合は、箱の底面部、およびセンサーパックのラベルからシリアル番号を確認することができます。また、センサー自体の外周部分でもご確認いただけます。

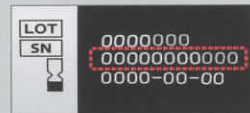

箱底面部のラベル  
シリアル番号 (SN) を確認



センサーパックのラベル  
シリアル番号 (SN) を確認

## シリアル番号メモ欄

本社：  
アボットジャパン合同会社  
ダイアベティスケア事業部  
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元：  
アボットジャパン合同会社  
ダイアベティスケア事業部  
千葉県松戸市松飛台 278

お客様  
相談窓口  
✉ [adc-cs.jp@abbott.com](mailto:adc-cs.jp@abbott.com)  
☎ 0120-37-8055  
[営業時間 8:00～20:00(平日)、8:00～17:00(祝日) ※土日除く]

**Abbott**